

Fremstilling af "pegefinger" i Orficast

Formål: stabilisering af en finger til brug ved telefon/ipad/tablet.

Materialer: Et stykke orficast 3 cm bredt – 20 cm langt, en saks, et håndklæde, en skål og en el-kedel med 70° varmt vand.



Fremgangsmåde: Opvarm vandet til ca. 70°. Hæld vandet op i skålen.

Læg Orficast i det varme vand 10 sek. Orficast ændre farve og bliver mere blød. Læg orficasten på håndklædet – uden at trække i det, men blot for at få vandet af.

Start ved fingerspidsen og lav et kryds mens fingerblommen (pulpa) er fri.





Vikl orficasten rundt om fingeren med et lille overlæg ved hver vikling. Stram ikke til. Træk ikke i materialet. Slut når fingeren ikke er længere og du når op til før grundledet. Form "pegefingeren" ved at holde omkring den i den stilling i leddene du ønsker, mens den køler af (varer 1-2 min). Mas ikke fingeren. Klip overskydende materiale af.



Klip spidsen til så fingerblommen er fri med en spids saks. Prøv den på fingeren og se om der er kanter som evt. kradser eller noget generer. Kanter som kradser eller river, kan blødgøres i det varme vand og grides flade. Dyp ikke hele "pegefingeren" og dyp ikke skinnen på fingeren i det varme vand.

Test om fingeren har kontakt til det medie den skal bruges til. Test om der er kontakt med skærmen og at der ikke er nogen kant på fingerskinnen som hindrer funktion på skærmen.